



N°	Qtà	Descrizione	Codice
1	1	Tube gruppo ottico	86.01.0144
2	3	Rasamento 20x10x0.3	19.10.0002
3	1	boccola maniglione	86.01.0135
4	1	Corpo gruppo ottico	86.01.0145
5	1	Assieme ventola vision	86.01.0098/99
6	1	bussola ottone	86.01.0124
7	1	Spina 3x10	17.10.0020
8	1	Vite TCE M5x10	17.05.0001
9	1	Grano TP M6x8 Nylon	17.08.0005
10	1	Tappo Frizione	86.01.0126
11	1	Rasamento 30x22x0.5	19.10.0013
12	1	Seger d.22	19.05.0008
13	1	deviatore+connettore	86.01.0049
14	1	Disco switch	86.01.0040
15	2	Vite TP M3x8 Speciale	86.01.0054
16	1	Boccola accopp int	86.01.0134
17	1	Molla tazza 10x20x0,8	19.06.0003
18	1	Dado M10 Autobl.	18.04.0010
19	1	Disco con regolazione fuoco	86.01.0143
20	1	Portalampadina	86.01.0110/Rev2
21	1	Calotta Grande	86.01.0133
22	1	lamp. alogena	86.01.0024
23	1	guarnizione parabola post.	86.01.0027
24	1	parabola	86.01.0031
25	1	Grano TP M3x8	17.07.0005
26	1	guarnizione parabola ant.	86.01.0028
27	1	anello ferma parabola	86.01.0113
28	4	Vite TCE 3x10	17.05.0015
29	2	spessore parabola	86.F300.0013
30	1	Pomello	86.01.0081
31	1	vetro	86.01.0063
32	1	Adesivo	86.01.0142
33	1	maniglia	86.01.0139
34	2	Vite TCE M4x12	17.05.0023
35	2	Rondella schnorr 4.3x7	19.06.0004

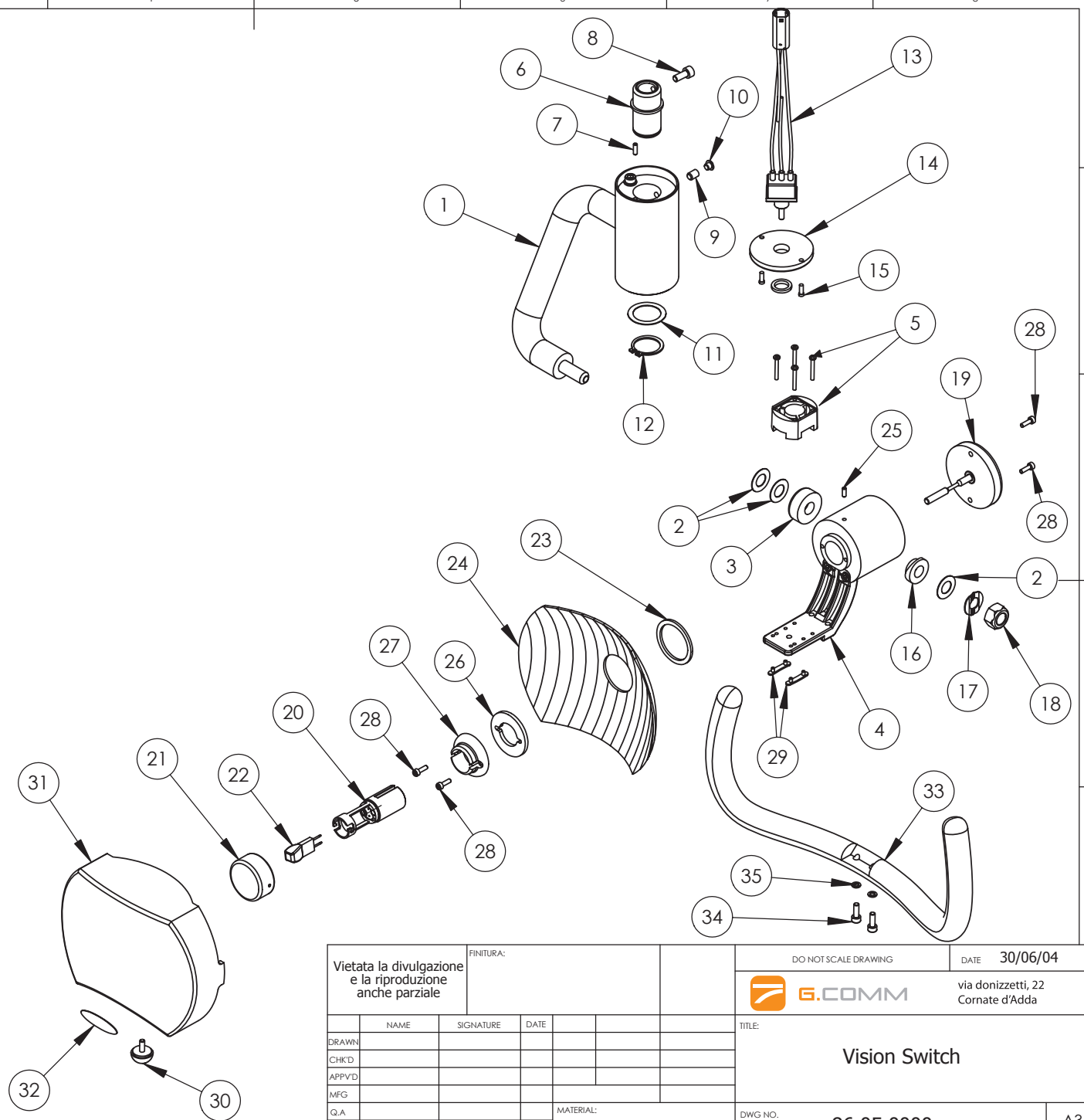

Vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale			FINITURA:		DO NOT SCALE DRAWING		DATE 30/06/04	
							via donizzetti, 22 Cornate d'Adda	
DRAWN:			SIGNATURE:		TITLE:		Vision Switch	
CHK'D:			DATE:					
APP'VD:								
MFG:								
Q.A:					MATERIAL:		DWG NO. 86.05.0000	
					Vari		A3	
					WEIGHT:			