



**СТОК
ДЕНТ**


ООО "СТОК-ДЕНТ"

117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57

тел.: +7(495) 33-202-99

e-mail: info@stock-dent.ru

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЩЕТОЧНЫМ МИКРОМОТОРОМ**
на стоматологической установке

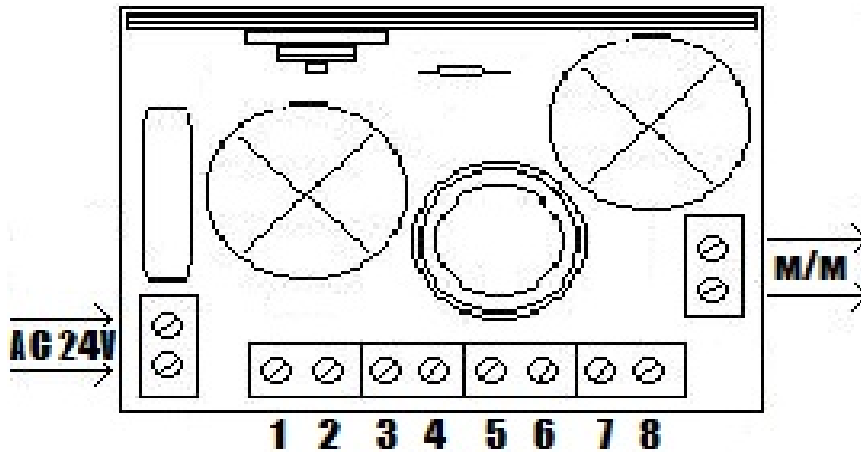

Подключение:

1.2. – пневматический микровыключатель (при использовании пневматического привода инструментов)

3.4. - регулятор скорости вращения микромотора (средний контакт регулятора спаивается с любым крайним контактом)

5.6. - тумблер включения реверса микромотора (средняя пара проводов тумблера)

7.8. - тумблер включения реверса микромотора (крайняя пара проводов тумблера)



(БЕЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ)