
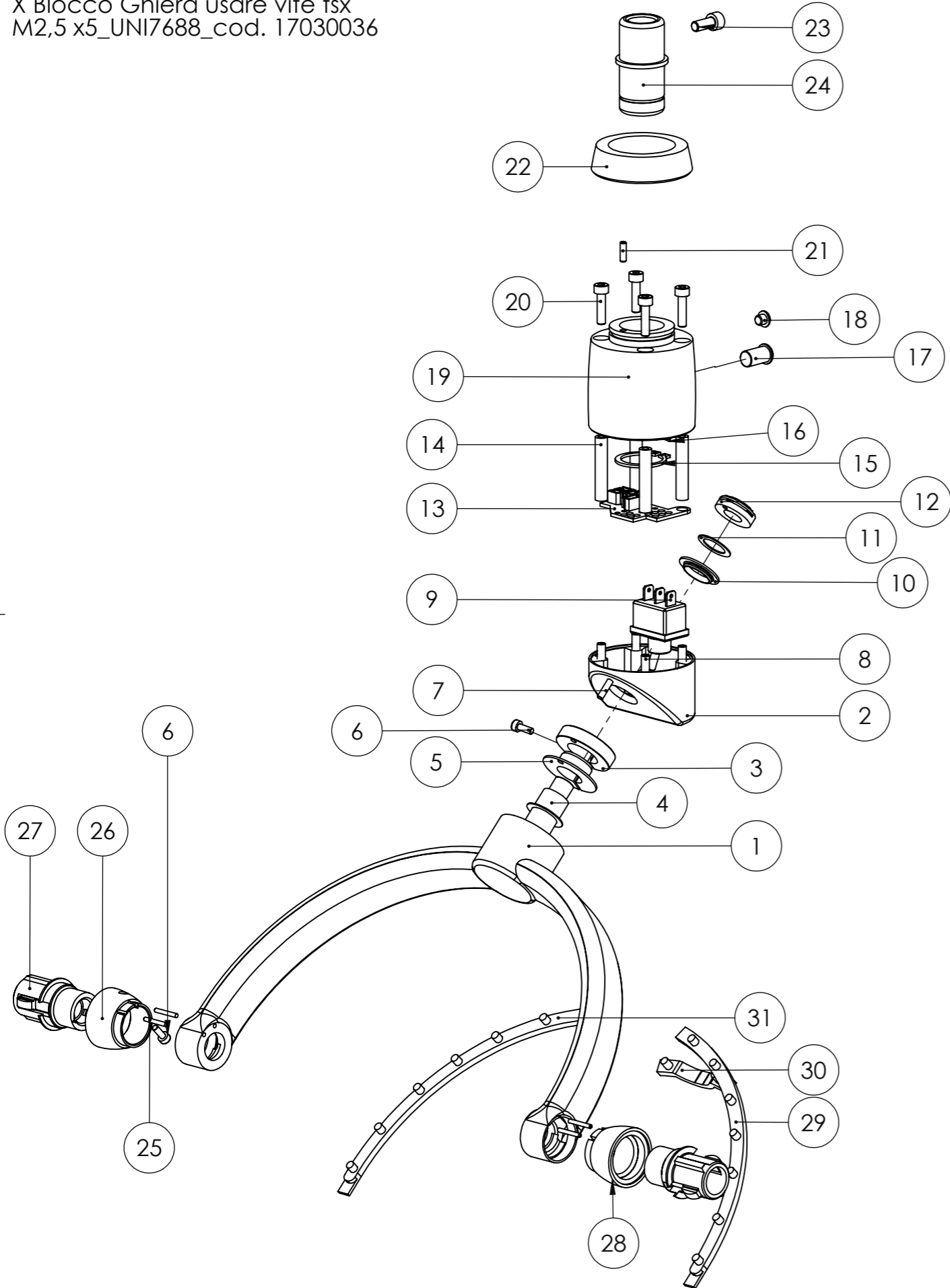



Num. articolo	Codice	Num. parte	Quantità
1	86.E000.0006	Protezione frontale isa/polaris	1
2	86.E000.0015.B	spinotto 1/4 di giro in ottone	2
3	86.E000.0003.B.PO	guscio anteriore mod.Polaris	1
4	86.H000.0021	Maschera frontale	1
5	86.E000.0007	Laterale guscio anteriore	2
6	17050061	Vite TCE 3x6_DIN 912 8.8 zincata	13
7	86.H000.0013	Assieme supporto potenziometri	1
8	86.H000.0003SP	Assieme piastra supporto bracci led	1
9		Assieme archetto	1
10	86.E000.0002.B.R2	guscio posteriore mod.Polaris R2	1
11	86.H000.0024	adesivo potenziometro polaris r2_resinata 65x36	1
12	17050026	Vite TCE M3x18_zincata_UNI5931	8
13	86.D000.0010.B	perno archetto optima dx	1
14	86.E000.0028	maniglia con copertura removibile	2
15	86.D000.0011.B	perno archetto optima sx	1
16	17020056	Vite TCX_3x8_autoform. DIN7500CE zinc.	8
17	19100015	rondella ras. ottone d.20x12x0.5	2
18	17100039	Chiavella 3x3 L=16	2
19	18040007	Dado M4 UNI7473 Autobl.	2
20	17070052	Grano T.P. 4x20 A2 UNI5923	2

Vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale		FINITURA:		RELEASE:		DO NOT SCALE DRAWING		DATE 18_03_2013	
						 <small>attrezzature e componenti per odontoiatria</small>		<small>Via Donizetti,22 20872 Cornate d'adda (MB)</small>	
	NAME	SIGNATURE		SCALE	1:10	TITLE: gruppo ottico polaris 3°mov			
DRAWN	G.Crivelli			TOLL. GEN.	±0.1				
CHK'D	N. Giaffreda								
APPV'D	N. Giaffreda								
MFG						DWG NO. 86.H200.0000		A3	
Q.A				MATERIAL:					
				WEIGHT:					

X Blocco Ghiera usare vite tsx
M2,5 x5_UNI7688_cod. 17030036



Num. articolo	codice	Num. parte	Quantità
1	86.H002.0003.B	Archetto lavorato 3°mov	1
2	86.H002.0001.B	Bicchierino 3°mov mod.polaris	1
3	86.H002.0005	Anello frizione 3°mov	1
4	86.H002.0002	Perno Rotazione 3°mov	1
5	86.H002.0007	Bussola Frizione 3°mov	1
6	17050003	Vite TCE M3x8_UNI5931	2
7	17100047	Spina cil. 3x14 UNI6364 Tol.m6	1
8	17070018	Grano TP M4x16 nero	4
9	30050003	Deviatore marquardt 1823.1101	1
10	86.H002.0006	Boccola ottone GFM-1416-03_1	1
11		Rasamento	1
12	86.H002.0004	Ghiera bloccaggio 3°mov	1
13	50040014	scheda interconnessione polaris r2	1
14	86.E300.0009.BR2	colonnina tubo g.o. r2	4
15	19050008	Seeger x albero d.22 DIN471	1
16		Dado M8	1
17		Tappo Lemo	1
18	86010126	Tappo tubo gruppo ottico	1
19	86.E300.0008.BR2	Tubo attacco g.o. polaris r2	1
20	17050047	Vite TCE M4x16_zincata_UNI5931	4
21	17100020	Spina cil. 3x10 UNI 6364 tol.m6	1
22	86.E000.0010.B	Ghiera copertua viti	1
23	17050001	Vite TCE M5x10_zincata_UNI5931	1
24	86010124	boccola seeger per tubo gr.ottico	1
25		Spina 2x15	4
26		Ghiera di copertura metallo	1
27	86.E000.0018	Aggancio rapido maniglia	2
28		Ghiera di copertura metallo_no frizione	1
29	86.F300.0006	copertura archetto dx	1
30	86.H002.0008	lunetta copertura centrale archetto 3°mov	1
31	86.F300.0007	copertura archetto sx	1

Vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale		FINITURA:	RELEASE:	DO NOT SCALE DRAWING	DATE 18_3_2013
				 <small>attrezzature e componenti per odontoiatria</small>	
				<small>Via Donizetti,22 20872 Cornate d'adda (MB)</small>	
DRAWN	G.Crivelli	SIGNATURE	SCALE 1:2	TITLE: AssiemeMov3Assi_revisione R2	
CHK'D	N. Giaffreda		TOLL. GEN. ±0.1		
APPV'D	N. Giaffreda				
MFG					
Q.A			MATERIAL:	DWG NO.	A3
			WEIGHT:		